



PLURYAL FILERI
PROBUDITE SAMOPOUZDANJE !

VAŠE NAJLEPŠE GODINE SU SADA!

VAŠE NAJLEPŠE
GODINE
SU SADA !



MD SKIN SOLUTIONS LABORATORIJE NA PRVI POGLED

Porodično preduzeće druge generacije

12
godina

13M
tretmana

70
zemalja

PLURYAL INJECTABLES

Vraćanje samopouzdanja

8
Filera

5
Densifiers

4
Tehnologije



NAŠA MISIJA: PRO-AGING LIFE COACH

Slogan Pluryal-a je
„VAŠE NAJLEPŠE GODINE SU SADA“

Verujemo u promovisanje individualnih standarda lepote koji poboljšavaju fizički izgled uz očuvanje prirodne lepote i identiteta.

Da biste pomogli svojim pacijentima da se osećaju samouvereno u bilo kom dobu, razvili smo pristup od 360 stepeni, koji se sastoji od širokog asortimana filera. Pružićete im potpuni holistički tretman, za koji je naučno dokazano da poboljšava teksturu, oblik i volumen kože, kose i tela.

ZAGARANTOVAN KVALITET

Pluryal proizvodi se proizvode u skladu sa strogim međunarodnim standardima: ISO 13485 i MDD93/42 (za medicinska sredstva) i ISO 22716 (za kozmetiku). Svi naši proizvodi podležu strogim kontrolama kvaliteta, pojedinačnim pregledima, ručnim i vizuelnim procenama pre njihovog puštanja na tržište.

KONTINUIRANE INOVACIJE

Pluryal je posvećen stalnim inovacijama i ulaže značajan procenat svojih godišnjih prihoda za istraživanje i razvoj. Ove godine Pluryal će objaviti inovativni koncept „densifiers“, potpuno nove generacije injekcionih proizvoda dizajniranih za tretiranje kože (lica i tela), kose i intimnih područja.


STUDIJE I KLINIČKA ISPITIVANJA

Kako bi se osigurala bezbednost i efikasnost svih Pluryal proizvoda, kontinuirano se sprovode klinička ispitivanja i testovi. Štaviše, naša Pluryal Akademija je posvećena redovnoj obuci i obrazovanju svih Pluryal lekara širom sveta o načinu primene preciznih protokola kako bi se garantovali najbolji rezultati za pacijente.



NAŠA
NAUKA JE
IZVRSNOST

3 LINIJE 3 TEHNOLOGIJE

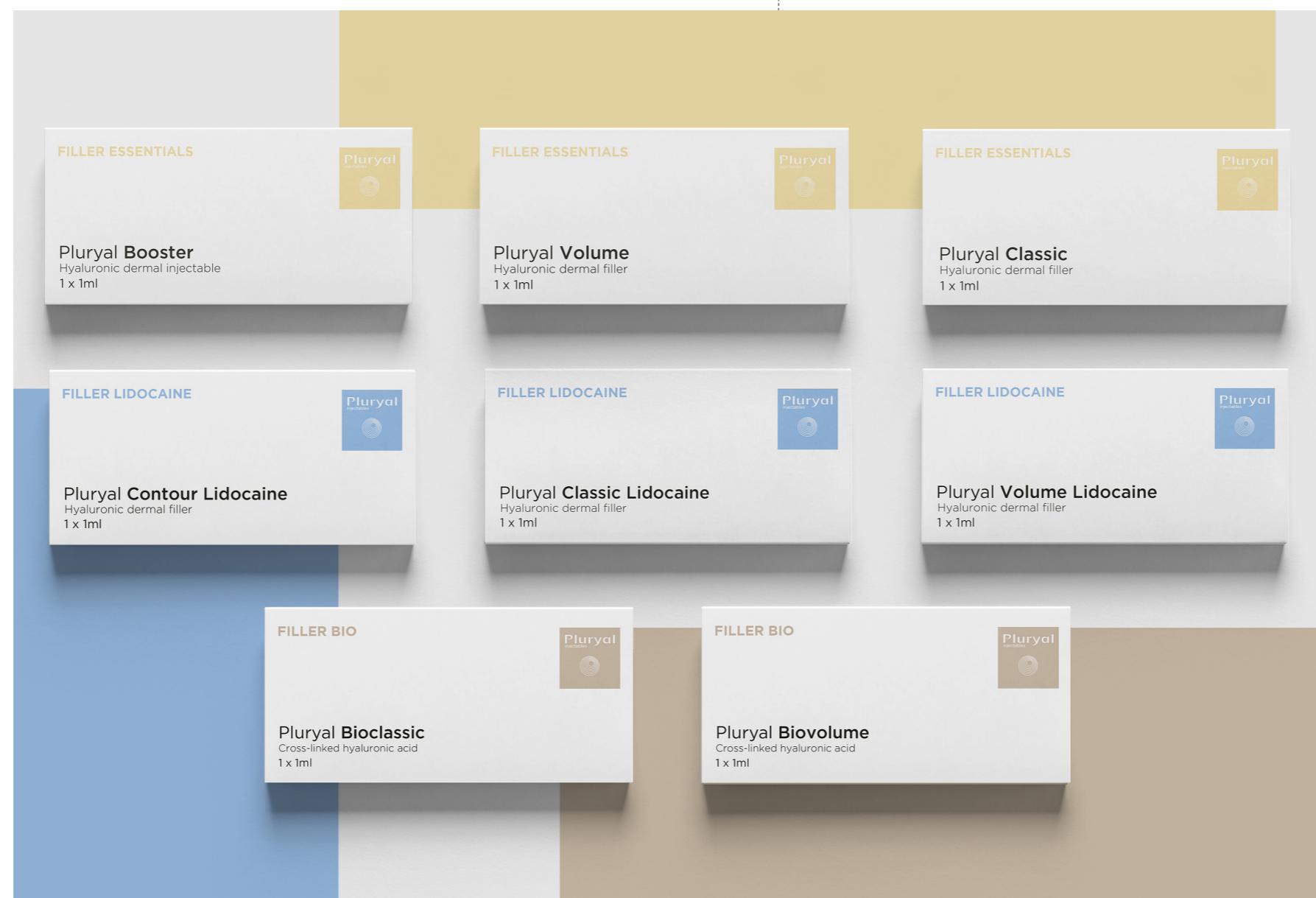

**FILLERS
ESSENTIALS**
P.R.E.M.I.U.M

**FILLERS
LIDOCAINE**
P.R.E.M.I.U.M LIDOCAINE

FILLERS BIO
MATRICYAL 3D

PLURYAL FILERI

ESSENTIALS
P.R.E.M.I.U.M. TEHNOLOGIJA

PLURYAL FILERI ESSENTIALS P.R.E.M.I.U.M. TEHNOLOGIJA

Linija „ESSENTIALS“ Pluryal filera zasnovana je na P.R.E.M.I.U.M. tehnologiji

Čisti

Prečišćavanje nakon umrežavanja kontroliše nivo ostataka endotoksina i BDDE.

Umreženi

Dokazano za svoju toleranciju, efikasnost i sigurnost, Pluryal CLASSIC i Pluryal VOLUME su umreženi sa BDDE (1,4-Butandiol-diglicidil-eter).

Pluryal BOOSTER je stabilizovan glicerolom koji dokazano poboljšava sjaj, elastičnost i turgor kože, a bolje je otporan na degradaciju.

Elastični

Gel ima visoku ili manju elastičnost pri odgovoru na deformaciju za kratko ili dugo vreme nakon uklanjanja primenjene sile. Ovaj parametar je određen koncentracijom HA, molekularnom težinom HA i udelom neumrežene HA u konačnom proizvodu. To ima posledice na glatkoći i prirodni efekat rezultata.

Monofazni

Pluryal fileri su absolutno homogeni gelovi, nema pojave sitno grupisanih čestica! Glavne prednosti su ravnomerna degradacija, glatki su i nežni na dodir, daju prirodan osećaj i izgled i nema potrebe za ispravkama!

Izotonični

pH i osmolarnost prilagođeni su fiziološkim uslovima radi boljeg komfora tokom tretmana.



PRIRODNA
LEPOTA

Lako rukovanje

Mala sila istiskivanja
zbog konusnog oblika*

Nizak rizik od infekcije pacijenata **
Visok kvalitet proizvoda i zaštita od
svih vrsta kontaminacije.



Sigurno aplikovanje***
Dodatna površina prianjanja
na zadnoj strani i klip za bolje
držanje.

Udobno rukovanje
Čvrsto dizajnirane komponente
za siguran i prijatan rad.

Vizuelna orientacija
Lak i brz pregled.

Inovativni dizajn
Dobitnik iF nagrade za dizajn
2017.

* EPC (End Product Control - kontrola krajnjeg proizvoda): Sila istiskivanja se testira na svakoj seriji
** Procena stabilnosti komponenti u skladu sa ASTM D4169 i kvalifikacijom komponenti materijala
*** Podaci proizvođača u evidenciji

Maksimalna postojanost

HA punila sa većim G (modulom elastičnosti) imaju bolji efekat punjenja i duže
vreme zadržavanja u mekom tkivu.
Pluryal Classic G (195.000 mPa) i Pluryal Volume G (400.000 mPa) superiorniji su
od konkurenције sa uporedivim viskozitetima i indikacijama.

PROIZVODI:

PLURYAL BOOSTER

PLURYAL CLASSIC

PLURYAL VOLUME



Pluryal Booster, Pluryal Classic i Pluryal Volume su sterilni, biorazgradivi,
viskoelastični, bistri, transparentni, izotonični i homogenizovani
injektabilni gel implanti. Proizvodi se sastoje od stabilizovane
ili umrežene hijaluronske kiseline (HA), dobijene iz bakterije
Streptococcus ecoli, formulisane do koncentracija koje variraju između
18 mg/ml do 23 mg/ml u fiziološkom puferu. Proizvedeni su prema
PREMIUM tehnologiji.

PLURYAL BOOSTER

Koncentracija hijaluronske kiseline: 1.8% (18mg/ml).

Ostali sastojci: Fosfatno citratni pufer.

Stabilizator / umreživač: Glicerol 2.0% (20mg/ml).

Sila istiskivanja (N): 8.

Endotoksi (EU/ml): < 0.5.

Molekularna težina (Da): 3 miliona.

Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Nadoknađuje gubitak hijaluronske kiseline usled starenja, održava kožu hidriranom. Za poboljšanje tonusa i elastičnosti kože. Filer za "crow `s feet" bore oko očiju, bore smejalice i pušačke bore oko usana.

Klinička istraživanja

Dokazana efikasnost u objavljenoj studiji* sprovedenoj na 20 volontera u Iranu:

Značajan porast ukupne elastičnosti 4 meseca nakon poslednje sesije 85% zadovoljnih korisnika.

Tretman je bezbedan i pogodan za sve pacijente.

Nivo injektiranja: Površinski dermis.

Učestalost tretmana: 3 sesije u intervalima od 2-3 nedelje, zatim po potrebi.

*Aiatollahi A, Firooz A, Samadi A. Procena bezbednosti i efikasnosti booster injekcija hijaluronske kiseline u poboljšanju kvaliteta kože lica. *Journal of Cosmetic Dermatology*, Volume 19, Issue 9, septembar 2020.

PLURYAL CLASSIC

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2.3% (23mg/ml).

Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl.

Stabilizator / umreživač: BDDE+++ (\leq 2 ppm).

Sila istiskivanja (N): 10.

Endotoksi (EU/ml): < 0.5.

Molekularna težina (Da): 3 miliona.

G faktor (mPa): 195,000.

Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Korigovanje umerenih do dubokih nazolabijalnih bora. Koristi se u kozmetičke i medicinske rekonstruktivne svrhe u lečenju npr. lipoatrofije lica, ožiljaka ili morfološke asimetrije.

Klinička istraživanja

Dokazana efikasnost u 2 objavljene studije sprovedene na 15 i 22 volontera u Francuskoj:

Studija 1*

Efikasan u tretiraju bora poput marionetskih i nazolabijalnih bora.

Efikasnost se održava nakon 6 meseci od injektoranja.

Tretman je bezbedan i svi pacijenti ga dobro podnose.

Studija 2**

Efikasan u poboljšanju tekture kože (bore, tonus i sjaj).

Objektivna procena je pokazala poboljšanje poređenjem fotografija kod 82% tretiranih pacijenata.

Još jedno multicentrično istraživanje *** sprovedeno na 70 pacijenata pod vođstvom dr Marine Landau je pokazalo efikasnost i bezbednost proizvoda u tretiraju nazolabijalnih bora.

Nivo injektiranja: Srednji do duboki dermis.

Učestalost tretmana: Svakih 5-6 meseci ili po potrebi.

* Boisnic S, Ben Slama L. Prednosti novog tretmana protiv starenja sa transdermalnom primenom rolera za proizvode Mesoline Refresh i Tight, u kombinaciji sa Pluryal filerima.

J. Med. Esth. I Chir. Derm. Vol KSKSKS VIII, 152, decembar 2011, 225-250.

** Mole B. Vrednost umrežene i stabilizovane hijaluronske kiseline u mezoterapiji. J. Med. Esth. I Chir. Derma. Vol KSKSKS IV, 174, jun 2017, 95-101.

*** Landau M. Ispitivanje bezbednosti i efikasnosti umrežene hijaluronske kiseline neživotinjskog porekla. Prime novembar / decembar 2011, stranice 42 - 48.

PLURYAL VOLUME

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2,3% (23 mg/ml).

Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl.

Stabilizator / umreživač: BDDE++++ (≤ 2 ppm).

Sila istiskivanja (N): 12.

Endotoksi (EU/ml): < 0.5.

Molekularna težina (Da): 3 miliona.

G' faktor (mPa): 400,000.

Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Korekcija dubljih bora i nabora, povećavanje ili vraćanje volumena licu i preoblikovanje kontura lica. Koristi se u kozmetičke svrhe, ali i medicinske rekonstruktivne svrhe u lečenju npr. lipoatrofije lica, ožiljaka ili morfološke asimetrije.

Klinička istraživanja

Značajno smanjenje dubokih nazolabijalnih bora prema MFWS skali, na 270 dana u poređenju sa početnim stanjem. 97.9% poboljšanje u izgledu nazolabijalnih bora prema GAIS skali, na kraju studija (270. dan).

Rezultati nezavisne "split-face" kliničke studije, tretman nazolabijalnih bora, prilikom koga je Pluryal Volume ubrizgan u jednu nazolabijalnu boru na licu, a Restylane® u drugu nazolabijalnu boru lica, kod 120 nasumično izabranih pacijenata pokazuju da je Pluryal Volume jednako efikasan kao Restylane®.

Nivo injektiranja: Duboki dermis ili potkožno.

Učestalost tretmana: Svakih 9-12 meseci ili po potrebi.

*Kopera i dr. Otvorena, multicentrična studija za procenu efikasnosti i bezbednosti dermalnog filera Princess VOLUME u tretiraju nazolabijalnih bora. Biomed Research International, Volume 2015, 7 strana.

** Dai i dr. Sigurnost i efikasnost dermalnog filera hijaluronske kiseline u korekciji umerenih do dubokih nazolabijalnih bora kod kineskih ispitanika. Klinička, kozmetička i istraživačka dermatologija, 2019: 12, 57-62.

CILJANA PODRUČJA SA PLURYAL ESSENTIALS FILERIMA



- 1. Nazolabijalne bore | 2. Vilica | 3. Glabelarne linije
- 4. Marionetske linije | 5. Obrazi | 6. Tekstura kože | 7. Vrat
- 8. Ruke | 9. Dekolte

PLURYAL FILERI

LIDOCAINE
P.R.E.M.I.U.M. LIDOCAINE
TEHNOLOGIJA

PLURYAL FILERI P.R.E.M.I.U.M. LIDOCAINE TEHNOLOGIJA

Linija "LIDOCAINE" Pluryal filera kombinuje P.R.E.M.I.U.M. tehnologiju dodavanja lidokaina (0,3% lidokain hidrohlorida). Pomoćna uloga lidokain hidrohlorida je da umanji bol povezan sa ubodima u kožu.

Pluryal Classic Lidocaine, Pluryal Volume Lidocaine i Pluryal Contour Lidocaine su sterilni, biorazgradivi, visokoelastični, bistri, transparentni, izotonični i homogenizovani injekcioni gel implantati koji se sastoje od umrežene hijaluronske kiseline (HA), dobijene iz bakterije Streptococcus ekui, formulisane u koncentraciji od 23 do 25 mg/ml u fiziološkom puferu dopunjena sa 0,3% lidokain hidrohlorida.



LEPOTA
JE OSEĆAJ

PROIZVODI:
PLURYAL CLASSIC LIDOCAINE
PLURYAL VOLUME LIDOCAINE
PLURYAL CONTOUR LIDOCAINE



PLURYAL CLASSIC LIDOCAINE

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2.3% (23mg/ml).
 Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl, 0,3% lidokain hidrohlorid.
 Umreživač: BDDE+++ (≤ 2 ppm).
 Sila istiskivanja (N): 10.
 Endotoksini (EU/ml): ≤ 2.
 Molekularna težina (Da): 3 miliona.
 G' faktor (mPa) 195,000.
 Čistoća lidokaina: do granica ICH K3B.
 Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Ispravlja umerene do duboke bore lica. Povećava volumen usana.
 Idealno za lipoatrofiju, ožiljke ili morfološku asimetriju.

Klinička istraživanja

Pluryal Classic Lidocaine je višestrandni i meki filer koji se može koristiti za usne i dermis.
 Objavljena studija* koju su sproveli Grablovitz i drugi na 60 ispitanika u Austriji je dokazala efikasnost i bezbednost proizvoda u korekciji nazolabijalnih bora gde:
 Kod 96% pacijenata se pokazala učinkovitim terapija nazolabijalnih bora. Studija je trajala 36 nedelja, rezultati 6 meseci.
 93,3% ispitanika je bilo veoma zadovoljno ishodom tretmana..

Nivo injektiranja: Srednji do duboki dermis.

Učestalost tretmana: 9-12 meseci ili po potrebi.

*Grablovitz i drugi. Sigurnost i efikasnost Princess FILLER Lidocaine u korekciji nazolabijalnih bora. Klinička, kozmetička i istraživačka dermatologija, 2019; 12, 857 - 864.

PLURYAL VOLUME LIDOCAINE

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2.3% (23mg/ml).
 Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl, 0,3% lidokain hidrohlorid.
 Umreživač: BDDE++++ (≤ 2 ppm).
 Sila istiskivanja (N): 13.
 Endotoksini (EU/ml): ≤ 2.
 Molekularna težina (Da): 3 miliona.
 G' faktor (mPa): 400,000.
 Čistoća lidokaina: do granica ICH K3B.
 Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Ispravlja duboke bore i nabore. Obnavlja i vraća volumen licu. Preoblikuje i remodeluje konture lica. Rešava problem lipoatrofije lica, problematičnih ožiljaka i morfološke asimetrije.

Klinička istraživanja

Mala sila istiskivanja pogodna je za glatke i predvidive rezultate: 12N.
 Pluryal Volume Lidocaine može se lako ubrizgati iglom od 27G ½ "tankog zida.
 Studija* koju su prihvatali Kopera i saradnici za objavljivanje dokazala je efikasnost i bezbednost Pluryal Volume Lidocaine za korekciju nazolabijalnih nabora kod 62 ispitanika: Obzirom da je 95,1% ispitanika pokazalo poboljšanje nazolabijalnih bora od najmanje 1 stepena na SRS skali, 24 nedelja nakon tretmana.
 Visoko zadovoljstvo ispitanika ≥93,5%.
 Visoki GAIS ≥93,5%.

Nivo injektiranja: Duboki dermis ili potkožno.

Učestalost tretmana: 9-12 meseci ili po potrebi.

*Kopera i dr. Perspektivna, otvorena, multicentrična, post -marketinška studija koja ocenjuje Princess® VOLUME Lidocaine za korekciju nazolabijalnih bora. Prihvaćeno za objavljinje.

PLURYAL CONTOUR LIDOCAINE

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2.5% (25mg/ml).

Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl, 0,3% lidokain hidrohlorid.

Umreživač: BDDE+++++ (≤ 2 ppm).

Sila istiskivanja (N): 15.

Endotoksini (EU/ml): ≤ 2.

Molekularna težina (Da): 3 miliona.

G' faktor (mPa): 650,000.

Čistoća lidokaina: do granica ICH K3B.

Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije


Koriguje nedostatak volumena srednje trećine lica, obnavlja volumen lica i oblikuje konture lica. Koriguje atrofiju masnog tkiva lica, povezanu sa korišćenjem lekova protiv HIV-a.

Klinička istraživanja

G' faktor je reološki parametar koji ukazuje na čvrstoću gelova hijaluronske kiseline. Visok G' faktor ukazuje na veliki volumen gela.


Pluryal Contour Lidocaine ima G' faktor veći od konkurenata sa ekvivalentom viskoznosti i indikacije.

Fizičko - hemijske karakteristike odabralih dostupnih filera na tržištu.

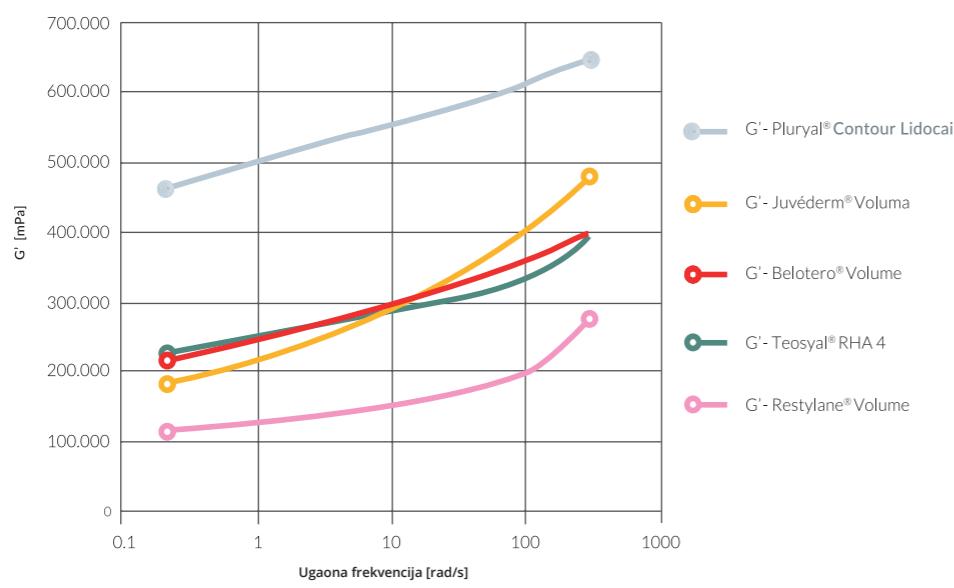

Nivo injektiranja: Duboki dermis, potkožno ili supraperiostalno.
Učestalost tretmana: 12-15 meseci ili po potrebi.

CILJANE REGIJE SA PLURYAL LIDOCAINE FILERIMA

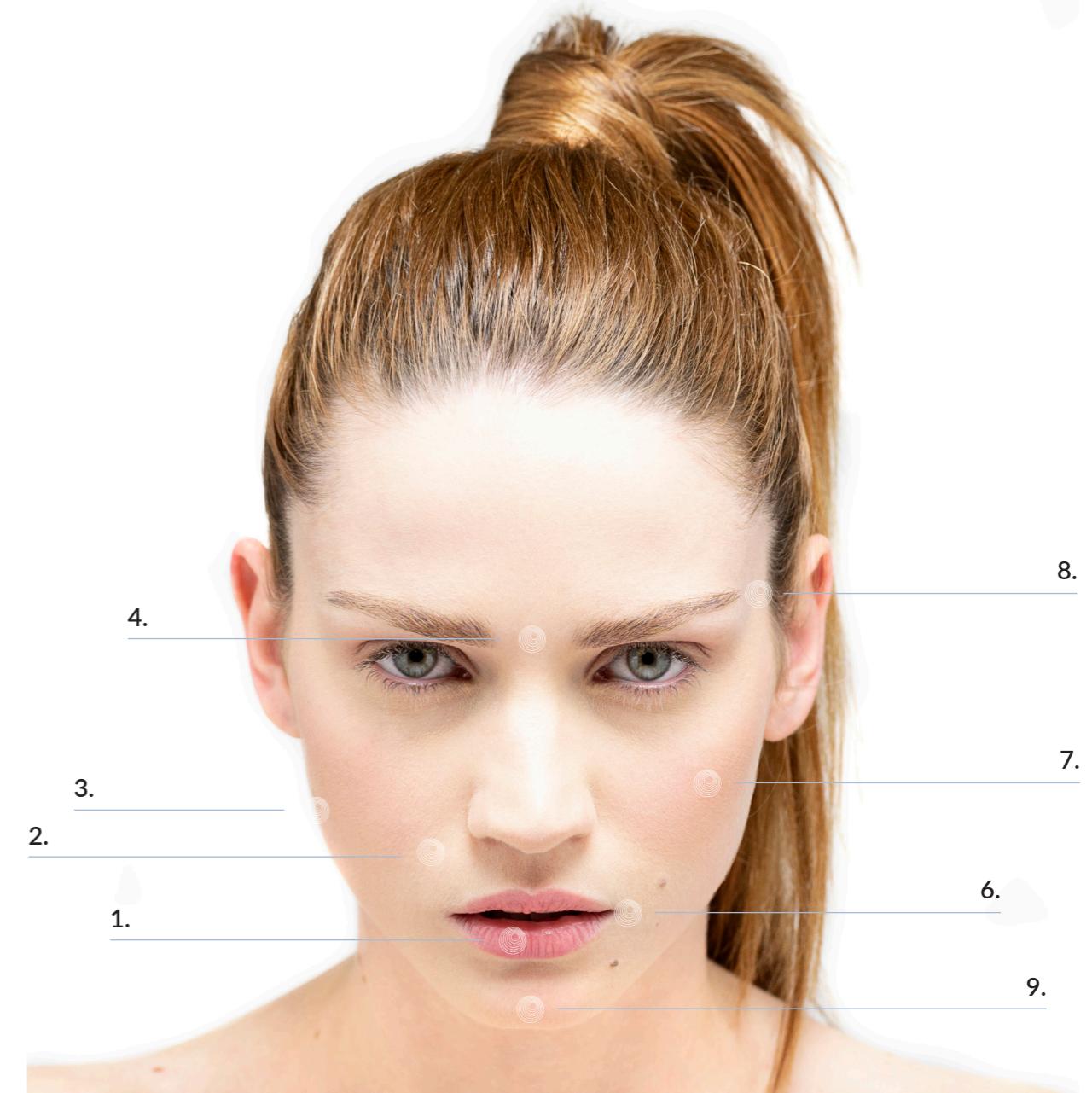

1. Usne | 2. Nazolabijalne bore | 3. Vilica | 4. Glabelarne linije
5. Morfološka asimetrija | 6. Marionetske linije | 7. Obrazi
8. Slepoočnice | 9. Brada

PLURYAL FILERI



PLURYAL FILERI BIO MATRICYAL 3D TEHNOLOGIJA

MATRICYAL 3D tehnologija se sastoji u upotrebi visoko prečišćene hijaluronske kiseline, kombinujući slobodnu i umreženu hijaluronsku kiselinsku koncentrovanu na 25 mg/ml. Ova inovativna tehnologija koristi 3D matricu omogućavajući joj da ima najniži mogući nivo zaostalog BDDE (<0,1ppm).

Controlled-release 3D matrix

FIG.1 : GENTLE CROSS-LINKING OF TWO HYALURONIC ACID WITH TWO DIFFERENT MOLECULAR WEIGHTS


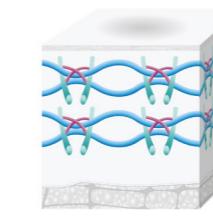


FIG.2 : LAYERING OF NATIVE HYALURONIC ACID

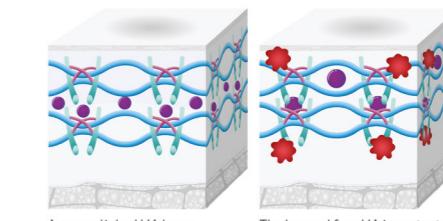

2 million Dalton HA

1 million Dalton HA

BDDE

Free HA

Enzyme

Slika 1 – Sporo umrežavanje

Dugo vreme umrežavanja na niskim temperaturama kako bi se dobio nekalibrirani jednofazni gel sa optimalnom viskoznošću. 2 vrste hijaluronske kiseline različite molekularne težine (jedna je 1 milion Da, drugih 2 miliona Da) je umreženo sa BDDE formirajući čvrstu 3D matricu.

Slika 2 – Slojevitost

Samo jedan umreženi sloj naizmenično se menja sa slobodnim slojem hijalurona (od 500.000 Da molekularne težine). Kada je slojevita u strukturi, zaštićena je odenzimske degradacije hijaluronidaze. Tada se hijaluronska kiselina postepeno oslobađa tokom vremena.

PROIZVODI:

PLURYAL BIOCLASSIC

PLURYAL BIOVOLUME

Pluryal Bioclassic i Pluryal Biovolume su sterilni, apirogeni, fiziološki i resorpcioni injektibilni gel implantati koji sadrže umreženu hijaluronsku kiselinu neživotinjskog porekla, sa izuzetnim viskoelastičnim svojstvima.



PLURYAL BIOCLASSIC

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2.5% (25mg/ml).

Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl.

Umreživač: BDDE++++ (≤ 0,1 ppm).

Sila istiskivanja (N): 23.

Endotoksi (EU/ml): < 20.

Molekularna težina: Aktivna matrica (Da) 2 miliona.

Ugrađena molekularna težina ima (Da) 1 milion (7%).

G' faktor (mPa) 100,000.

Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Tretman nedostataka koji zahtevaju obogaćivanje tkiva lica sa privremenim volumetrijskim povećanjem kroz rast osnovnog tkiva.

Klinička istraživanja

"Bio" proizvodi danas nude najprirodnije rezultate na tržištu zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama MATRICYAL 3D tehnologije i ekskluzivnom monofaznom neograničenom proizvodnom procesu.

Proizvedeno pomoću nežnog umrežavanja i slojevitog hijalurona:

Nežno umrežavanje:

Više homogenosti i sigurnosti;

Bolja distribucija u tkivima.

Slojeviti hijaluron zaštićen od enzimske razgradnje i sporo se oslobađa:

Više plastičnosti;

Bolja penetracija;

Snaga širenja tkiva veća.

Trostruka akcija za najprirodnije rezultate:

Volumetrijsko delovanje: proizvod fiziološki obnavlja volumen;

Obnavljanje: poboljšanje tkiva receptorskom stimulacijom;

Hidratantno dejstvo: ponovo integriše prirodnu osmolarnost tkiva.

Nivo injektiranja: Srednji do duboki dermis.

Učestalost tretmana: 5-6 meseci ili po potrebi.

PLURYAL BIOVOLUME

Koncentracija hijaluronske kiseline: 2.5% (25mg/ml).

Ostali sastojci: Fosfatni pufer, NaCl.

Umreživač: BDDE++++ (≤ 0,1 ppm).

Sila istiskivanja (N): 30.

Endotoksini (EU/ml): < 20.

Molekulana težina: Aktivna matrica (Da) : 2 miliona.

Ugrađena molekularna težina ima (Da) 1 milion (5%).

G' faktor (mPa) 200,000.

Sterilizacija: Parna sterilizacija.

Indikacije

Tretman nedostataka koji zahtevaju obogaćivanje tkiva lica sa privremenim volumetrijskim povećanjem kroz rast osnovnog tkiva.

Klinička istraživanja

"Bio" proizvodi danas nude najprirodnije rezultate na tržištu zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama MATRICYAL 3D tehnologije i ekskluzivnom monofaznom neograničenom proizvodnom procesu.

Proizvedeno pomoću nežnog umrežavanja i slojevitog hijalurona:

Nežno umrežavanje:

Više homogenosti i sigurnosti;

Bolja distribucija u tkivima.

Slojeviti hijaluron zaštićen od enzimske razgradnje i sporo se oslobađa:

Više plastičnosti;

Bolja penetracija;

Snaga širenja tkiva veća.

Trostruka akcija za najprirodnije rezultate:

Volumetrijsko delovanje: proizvod fiziološki obnavlja volumen;

Obnavljanje: poboljšanje tkiva receptorskog stimulacijom;

Hidratantno dejstvo: ponovo integriše prirodnu osmolarnost tkiva.

Nivo injektiranja: Površinski, potkožno.

Učestalost tretmana: 5-6 meseci ili po potrebi.

CILJANE REGIJE SA PLURYAL BIO FILERIMA



1. Nazolabijalne bore | 2. Vilica | 3. Glaberne linije | 4. Marionetske linije | 5. Obrazi
6. Usne | 7. Slepoočnice | 8. Brada

LEPOTA JE
SAMOPOUZDANJE



PROIZVOD	PLURYAL BOOSTER	PLURYAL CLASSIC	PLURYAL VOLUME	PLURYAL CLASSIC LIDOCAINE	PLURYAL VOLUME LIDOCAINE	PLURYAL CONTOUR LIDOCAINE	PLURYAL BIOCLASSIC	PLURYAL BIOVOLUME
Špric	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml
CE Obeležavanje	CE 0459	CE 0459	CE 0459	CE 0123	CE 0123	CE 0123	CE 0373	CE 0373

Igla	2 x 30 G ½"	2 x 27 G ½"	1 x 27 G x 13 mm 1 x 30 G x 13 mm	1 x 23 G x 19mm 1 x cannula 25 G x 38mm				
CE Obeležavanje	CE 0197	CE 0120	CE 0123					

Pluryal Injectables su medicinski proizvodi III klase koje smeju da koriste samo lekari koji su prošli posebne obuke iz estetske medicine. Pročitajte uputstva pre upotrebe. Obavestite pacijente o mogućim neželjenim efektima.

TEHNOLOGIJA &
INOVACIJA
SVE U JEDNOM
MOLEKULI
HIJALURONSKE
KISELINE



Generalni zastupnik i distributer



MIKODENTAL

Glavno sedište firme:
Stojana Novakovića 19
15000 Šabac/Srbija
Tel/fax: + 381 15 345 123
Tel: + 381 15 300 261
Tel: + 381 64 643 8154

MIKODENTAL CROATIA

CIRKON-DENTAL
Smičiklasova 8
47000 Karlovac
Tel.: +385 915464696

MIKODENTAL BG

Gandijeva 130a
11070 Novi Beograd/Srbija
Tel: + 381 11 411 89 48
Tel: + 381 64 6438164
Tel: + 381 64 6438153

MIKODENTAL BH

Branislava Nušića 162
71000 Sarajevo/BiH
Tel/fax: + 387 33 712 111



www.bestdentalshop.rs

[/bestdentalshopmikodental](https://www.facebook.com/bestdentalshopmikodental)

[/bestdentalshop](https://www.instagram.com/bestdentalshop/)



ADVANCED ORAL IRRIGATION SYSTEM

www.aquapick.rs

[/AquapickRS](https://www.facebook.com/AquapickRS)

[/aquapick_mikodental_info](https://www.instagram.com/aquapick_mikodental_info)



www.mikodental.rs

[/mikodentaldepot](https://www.facebook.com/mikodentaldepot)

[/mikodental](https://www.instagram.com/mikodental/)

[/mikodentalvideo](https://www.youtube.com/mikodentalvideo)



www.kodent.rs

[/stomatoloski.centar.kodent](https://www.facebook.com/stomatoloski.centar.kodent)

[/kodent_dental_clinic](https://www.instagram.com/kodent_dental_clinic)



PROFESSIONAL PRO AGING SOLUTION

www.mdbeauty.rs

[/filerihijaluronmezoterapija](https://www.facebook.com/filerihijaluronmezoterapija)

[/mikodental](https://www.instagram.com/mikodental/)

[/pluryalsrbija](https://www.instagram.com/pluryalsrbija)


[/pluryalsrbih](https://www.instagram.com/pluryalsrbih)

[/pluryalcrnagora](https://www.instagram.com/pluryalcrnagora)

Pluryal Akademija

[/groups/507728576573183](https://www.facebook.com/groups/507728576573183)

[/pluryal.official](https://www.facebook.com/pluryal.official)
 [/pluryal](https://www.instagram.com/pluryal/)

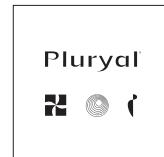

Pluryal
MD Skin Solutions
9AB Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
T: +352 26 20 04 06
pluryal.com